

Imperial

masaje & levantapersonas

Manual



Sofá
masaje & levantapersonas

Gracias por adquirir nuestro sillón de masaje Imperial. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizarlo (especialmente las partes relacionadas con la seguridad) para utilizar el sillón de forma apropiada. Guarde el manual tras su lectura para que pueda consultarlo siempre que sea necesario.

Normas de Seguridad	4
Partes del Sillón	5
Mando de masaje	5
Funcionamiento del mando de masaje	5
Zonas de masaje.....	6
Funcionamiento del mando del Levantapersonas	6
Características principales	7
Instrucciones de montaje	8
Advertencia	10
Resolución de problemas.....	11
Certificados	12

Normas de Seguridad

- No coloque nunca el sillón de masaje en lugares húmedos o con acumulación de polvo, podría provocar un fallo en el aparato eléctrico o una disfunción mecánica..
- Nunca utilice el sillón de masaje en el interior cuando la temperatura de la habitación supere los 40°C.
- Nunca ponga el sillón cerca de un foco de calor (horno, caldera, etc ..) o bajo luz solar directa.

No utilizar el sillón si:

- El sillón está mojado.
- Si tiene las manos mojadas.
- Limpiar sólo con paños secos.

Situaciones no aptas para el uso del sillón de masaje:

- Detenga el funcionamiento en caso de que se moje o no funcione, si hay una parte del sillón dañada y expuesta, si durante el masaje se siente raro o nota dolor o si ha ocurrido un fallo eléctrico.

Cuando el sillón de masaje no esté en uso:

- Asegúrese de apagar la corriente después de usarlo.
- Desenchufe para cortar el suministro de corriente si no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo.
- Ponga el sillón de masaje en un lugar limpio y seco.

Desmontar el sillón de masaje:

- No quite el respaldo del sillón.
- No desmonte ni repare el sillón por sí mismo.

Modo correcto de manejar el enchufe:

- Compruebe si el voltaje es el apropiado
- Nunca fuerce el cableado.
- Nunca tire del cable con las manos mojadas.
- Cuando tire del enchufe, agarre el enchufe.
- No utilice el sillón de masaje si el cable o el enchufe están dañados.

Partes del sillón de masaje

- 1) Respaldo
- 2) Reposabrazos
- 3) Asiento
- 4) Reposapiés
- 5) 2 Mandos



Mando de Masaje

- 1) **Power** – Encendido
- 2) **Heat** – Activa/desactiva función calor
- 3) **INT High/Low** – Intensidad de masaje Alto/Bajo
- 4) **Mode** – Selección del modo de calor
- 5) Elección zona de masaje

- **Espalda**

- **Zona Lumbar**

- **Muslos**

- **Piernas**



Funcionamiento del Mando de Masaje


- 1) Asegúrese de que todas las conexiones están correctas
- 2) Enchufe el cable a la red eléctrica
- 3) **POWER:** Pulse esta tecla para encender/apagar
- 4) **MODE:** Pulsando este botón, podemos elegir entre los diferentes modos de masaje.
- 5) **AUTO:** es el más recomendado. Para elegir la zona en la que desea recibir el masaje, basta con pulsar el botón de la zona elegida; espalda, zona lumbar, muslos o piernas.

Zonas de masaje



8 motores de vibración repartidos en:

- 1) 2 Motores superiores ubicados en la espalda
- 2) 2 Motores ubicados en la zona lumbar
- 3) 2 Motores ubicados en el asiento
- 4) 2 Motores ubicados en el reposa pies

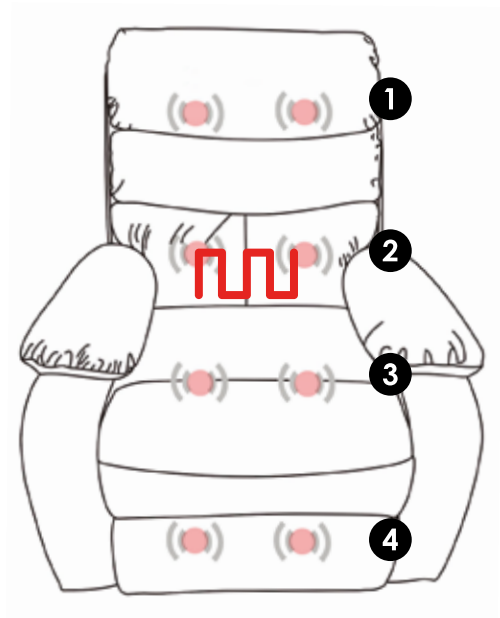Además, función de calor ubicada en la zona lumbar de la espalda.



Funcionamiento del Mando del Levantapersonas

- 1) Presione el botón  para la función levantapersonas.
- 2) Presione el botón  para la función reclinar y para que el Sillón masaje Levantapersonas Imperial regrese a su posición original.

Características principales

1) Componentes: El Sillón Imperial se compone por 1 Respaldo, 2 reposabrazos, 1 asiento, 1 reposapiés. 1 mando, 1 alimentador de corriente.

2) Funciones: Respaldo reclinable, reposapiés extensible, función calor y función masaje.


3) Sistema de Seguridad: la función calor y la función masaje se detendrán tras 15 minutos de uso para evitar descuidos o sobrecalentamientos.

4) Precauciones:


- No se sienta sobre el mando ni ponga objetos pesados sobre él.
- No deje que el mando caiga al suelo.
- No tire del cable a la fuerza.
- No utilice el mando con las manos mojadas.
- No oprima los botones con objetos afilados
- No desenchufe el mando antes de apagar la corriente.

Instrucciones de montaje

Componentes: El Sillón Imperial se compone por 1 Respaldo, 2 reposabrazos, 1 asiento, 1 reposapiés. 1 mando, 1 alimentador de corriente.

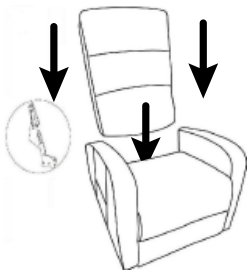

1) **Inserte el respaldo en el asiento.** Presione hacia abajo hasta que el respaldo queda en su posición bloqueado.

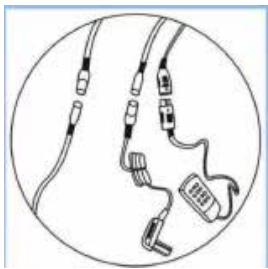

2) **Conecte las clavijas** (blanco con blanco / rojo con rojo).



3) **Conecte el enchufe de red** con su clavija correspondiente.




4) **Conecte el mando** con su correspondiente clavija.



5) **Conecte el transformador** a la clavija correspondiente del sillón y a su clavija de cable de red.

6) Conecte el motor

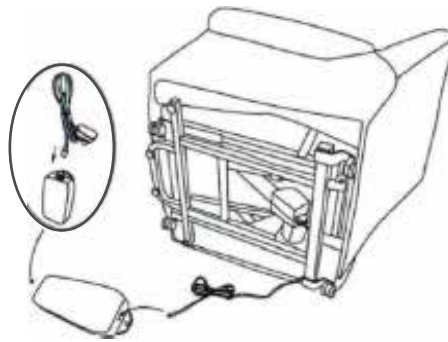

ADVERTENCIAS


- No se ponga de pie sobre el sillón. No utilice el Sillón Imperial como escalera de mano.
- Sólo puede utilizarlo una persona a la vez.
- No se recomienda su utilización a personas con marcapasos.
- Utilizar sólo si todas las conexiones, tornillos y anclajes son seguros.
- No intente manipular ni arreglar este producto usted mismo. Cualquier manipulación no realizada por el personal autorizado puede hacer que la garantía quede inhabilitada.
- El incumplimiento de estas advertencias o consejos de utilidad puede incurrir en graves daños.

Resolución de problemas:

- Compruebe lo siguiente cuando el sillón no le funcione.
- Asegúrese de apagar la corriente y de desconectar el o el enchufe de suministro de energía. Si tiene alguna pregunta no dude en contactar con nosotros.
- No desmonte ni repare parte alguna del sillón de masaje por sí mismo.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA
Se produce ruido durante el masaje	Se trata del ruido normal de los motores de masaje en vez de a un fallo del sillón
El sillón de masaje no funciona tras activar la opción en el mando	Compruebe si el enchufe AC está bien insertado en la toma de la pared: Compruebe si el botón de suministro de energía está encendido.

CERTIFICADOS

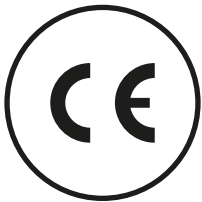

Datos Técnicos

- Certificados (CE; GS)
- Voltage: Input: 230V-50HZ | Output: DC12V
- Tamaño de embalaje: 78 x 77 x 66 cm
- Tamaño sillón: 100 x 92,5 x 80 cm
- Peso: 42 Kg
- Peso máximo que soporta: 125 kg.
- Material: Polipiel de Alta Calidad

