



3G

Andador plegable

MANUAL DE USUARIO

Ref. AAL3GP

más de 50 años viviendo sin límites

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DESDE TOTALCARE EUROPE

LE AGRADECEMOS SU CONFIANZA

Gracias por adquirir un producto de **IM** by **TotalCare Europe**.

El producto que usted ha adquirido está dotado de la más avanzada tecnología y ha soportado las pruebas más exigentes.

La experiencia a lo largo del tiempo hace que nuestros productos ofrezcan las mejores prestaciones, haciendo que usted pueda disfrutar cada día más de la libertad y autonomía que necesita.

Le sugerimos que dedique un momento para leer las instrucciones que le proporcionamos. Así podrá familiarizarse con su nuevo andador **3G**, que le permitirá obtener el máximo rendimiento y vida útil de este.

más de **50 años** viviendo **sin límites**

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA.

Importante leer el manual antes de utilizar el producto.

1 – Partes	4
2 – Descripción	4
3 – Características técnicas	5
4 – Instalación y uso.....	6
5 – Mantenimiento y limpieza	6
6 – Garantía	7

1. PARTES DEL ANDADOR 3G



2. DESCRIPCIÓN DEL ANDADOR 3G

ANDADOR PLEGABLE PARA INTERIORES CON ASIENTO

El caminador 3G es un andador ligero, resistente y compacto. Está diseñado con un sistema de fácil plegado que permite ahorrar espacio y transportarlo fácilmente. Una de las principales ventajas de este andador es su eje delantero con dos ruedas, que ofrece un mayor desplazamiento

y genera estabilidad, seguridad, confianza y autonomía en el usuario. Dispone de un asiento práctico para sentarse en el momento que la persona lo requiera.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ANDADOR 3G



3G

Medidas

Ancho total	56 cm
Ancho entre ruedas traseras	41,5 cm
Profundidad total	50 cm
Profundidad plegado	22 cm
Alto total (regulable)	89,5 - 97,5 cm
Alto del asiento al suelo	58,5 cm

Peso

Peso total	2,60 kg
Peso máximo soportado	100 kg

Material	Aluminio	Color	Plata
----------	----------	-------	-------

Asiento

Ancho del asiento	39 cm
Profundidad del asiento	19,5 cm
Alto del asiento al suelo	58,5 cm
Tipo de asiento	Extraíble
Material del asiento	Acolchado
Color del asiento	Gris

Otras características

Plegable	Sí
----------	----

4. INSTALACIÓN Y USO DEL ANDADOR 3G



- Revise que están todos los objetos, el embellecedor no aparece en dicha imagen, pero usted debe tenerlo. **1**
- Para desplegar el andador, aplique una leve fuerza hacia abajo, como se muestra en la imagen. **2**
- Para colocar el asiento, debe de coincidir con las dos barras que se muestra en las imágenes. **3**
- Introduzca la barra de metal dentro del orificio, como se muestra en imagen. **4**
- Para fijar una altura utilice el embellecedor una vez tenga introducida las barras de metal. **5**

5. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL ANDADOR 3G

- Hacer un mantenimiento regular al andador.
- Limpie el chasis con un paño húmedo para quitar la suciedad.
- Guarde el andador en el interior de su hogar por la noche. No lo exponga a aire salado o ambientes hostiles. Si lo expone, comprobar los daños y limpiarlo antes de utilizarlo.
- Semanalmente comprobar las ruedas, si giran correctamente, si no tienen pelusas o algo que afecte a su funcionamiento.
- El chasis que no esté dañado, que no tenga grietas, ni este desoldado en algún lugar. Que los frenos funcionen de forma óptima. En caso contrario llegar al servicio técnico para su ajuste.

6. GARANTÍA DEL ANDADOR 3G

DURACIÓN DE LA GARANTÍA

El producto adquirido por Ud. queda protegido por la presente garantía, por la falta de conformidad del cliente que se manifieste en el plazo de 3 años desde la fecha de compra del producto o la fecha de entrega.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

La garantía cubre toda avería o defecto de fabricación durante los primeros 24 meses desde la compra del producto, a partir de los 2 años y hasta los 3 años, el consumidor debe seguir dirigiéndose a la parte vendedora para conseguir reparar la falta de conformidad del bien, pero en el caso necesario el usuario deberá demostrar que el producto esta defectuoso por fabricación y no por un mal uso o una falta de mantenimiento.

El alcance territorial de esta Garantía es para todo el territorio nacional español.

La presente Garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en defensa de los consumidores.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Para poder hacer efectiva la Garantía el consumidor deberá dirigirse al punto de venta donde adquirido el producto, en el caso de que le sea imposible la comunicación con el punto de venta, ya sea porque ha cerrado o porque ha adquirido el producto en otra comunicad autónoma, se podrá dirigir directamente al fabricante a través del correo electrónico info@totalcare-europe.com.

Es imprescindible presentar copia de la factura o del ticket de compra, o un albarán de entrega posterior a la factura o ticket, en el momento de la reclamación, donde ampare claramente el producto comprado y la fecha.

El consumidor deberá entregar el producto en el mismo lugar que los adquirió, acompañando una nota explicativa de la falta de conformidad.

LA PRESENTE GARANTÍA NO CUBRE

- Los daños causados por mal uso por parte del usuario al no obedecer las instrucciones indicadas en este manual o causadas por otros factores humanos, mal uso, colisión con algún objeto...
- Los daños causados por accidente, abuso, negligencia o mal uso.
- Los daños causados por fuego, inundación, tormentas o cualquier evento de la naturaleza.
- Los productos que hayan sido previamente reparados o manipulados por personal no autorizado por el fabricante o vendedor.
- Si las piezas utilizadas no son fabricadas por nuestra empresa.
- Cualquier producto que no lleve o tenga alterado o borrado su numero de serie o de fábrica.
- La garantía no cubre los elementos de desgaste.
- Las reparaciones o sustitución de la pieza defectuosa serán efectuadas por un personal cualificado y autorizado por TotalCare Europe, S.L.

NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI APARENTEMENTE ESTÁ DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS.

CONTACTE CON SU PROVEEDOR.

Leyenda etiquetaje.



Conformidad Europea.



Debe consultar las instrucciones de uso para obtener información de seguridad.



Consulte el manual de usuario antes de utilizar el producto.



Datos del fabricante.



Fecha de fabricación.



Representante Europeo.



Lote.



Referencia del producto.



Número de serie.



Producto sanitario conforme con el MDR.

Manual de usuario

Andador plegable 3G

V3 · 08/04/2022