

VERMEIREN

Eclips X2

MANUAL DE INSTALACIÓN





Contenido

ES

Introducción	2
1 El producto	3
2 Paquete de entrega	3
3 Montaje y ajustes	4
3.1 Herramientas	4
3.2 Montaje y desmontaje.....	4
3.3 Ajustar la silla de ruedas al usuario	4
3.4 Configuración de las ruedas delanteras y traseras.....	5
3.5 Cambio de neumáticos (si procede)	6

Introducción

Le ofrecemos este manual de instalación para ayudarle con la instalación y cualquier reparación de esta silla de ruedas manual. Por favor léalo detenidamente. Si todavía tiene alguna duda después de leer este manual, contacte con Vermeiren.

La información contenida en este manual es aplicable a la(s) siguiente(s) silla(s) de ruedas:

- Eclips X2

ES

Nota importante

Hay imágenes del producto para ayudar a explicar las instrucciones. Los detalles del producto mostrado pueden variar con respecto a su producto.

Información disponible

En nuestro sitio web <http://www.vermeiren.com/> siempre encontrará la versión más reciente de la siguiente información. Consulte este sitio web de manera regular para estar al tanto de posibles actualizaciones.

Las personas con discapacidad visual pueden descargarse la versión electrónica del manual y utilizar un software de síntesis de voz para poder oír su contenido.



Manual de instrucciones
Para el usuario y el distribuidor especializado



Manual de instalación
Para el distribuidor especializado



Manual de mantenimiento para sillas de ruedas
Para el distribuidor especializado



Esquemas de las piezas (de recambio)
Para el distribuidor especializado



Declaración CE de conformidad

1 El producto

ES



1. Respaldo
2. Empuñadura
3. Reposabrazos
4. Asiento
5. Reposapiés
6. Paleta del reposapiés
7. Rueda delantera
8. Cruceta
9. Rueda trasera
10. Aros de propulsión
11. Tapón
12. Frenos
13. Palanca plegado respaldo
14. Freno de mano
15. Placa de identificación

2 Paquete de entrega

Los siguientes objetos forman parte de la entrega:

- Bastidor con asiento y respaldo
- Ruedas
- Reposapiés
- Reposabrazos
- Manual de instrucciones
- Herramientas
- Accesorios (si procede)

Antes de usar la silla de ruedas, compruebe que todo viene incluido y que ninguna de las piezas esté dañada.

Téngase en cuenta que la configuración básica puede variar en diferentes países de Europa. Consulte con su distribuidor especializado al respecto.

3 Montaje y ajustes

⚠ PRECAUCIÓN Riesgo de lesiones o daños

- Téngase siempre en cuenta los detalles técnicos y los límites de uso previsto; ver el manual de usuario.
- La silla de ruedas debe montarla, desmontarla y ajustarla un distribuidor especializado siguiendo las instrucciones recogidas en este capítulo.
- Sólo utilizar las piezas y herramientas descritas en este manual.
- Evitar que entren personas ajenas a la zona de (des)montaje.
- Colocar todas las piezas pequeñas en una caja o bolsa.
- Mientras se (des)monta y utiliza la silla de ruedas, asegurarse de que no se queden atrapados objetos o partes del cuerpo entre las piezas móviles. En particular, tenga en cuenta la posición de los cables.
- Asegurarse de que todos los tornillos estén bien fijados antes de ir con la silla de ruedas.

i Para más información, contacte con su centro de Vermeiren más cercano.

3.1 Herramientas

Para montar, ajustar y desmontar la silla de ruedas, se necesitan las siguientes herramientas:

- Juego de llaves Allen n.º 4, 5 y 6
- Juego de llaves n.º 10 y 13

3.2 Montaje y desmontaje

El montaje y desmontaje de la silla de ruedas se describe en el manual de instrucciones.

3.3 Ajustar la silla de ruedas al usuario

3.3.1 Ajuste de los frenos de estacionamiento


1. Monte las ruedas según se indica en el manual de instrucciones.
2. Para desconectar los frenos, tire de la palanca (1) hacia atrás.
3. Afloje los pernos (2) para que el mecanismo del freno pueda deslizarse por la guía (3).
4. Deslice el mecanismo del freno por la guía hasta la posición que desee.
5. Vuelva a apretar los pernos (2).
6. Verifique el funcionamiento de los frenos.
7. Si fuera necesario, repita los pasos anteriores hasta que los frenos estén bien ajustados.



3.3.2 Longitud del reposapiés

Regule la longitud del reposapiés como se indica a continuación (3 posibles posiciones: intervalos de 35 mm, orificios fuera del tubo ; 6 posibles posiciones: intervalos 25 mm, tubo interior):



1. Saque el tornillo (4).
2. Ajuste la longitud del reposapiés a la medida que le resulte cómoda.
3. Apriete el tornillo (4) correctamente.

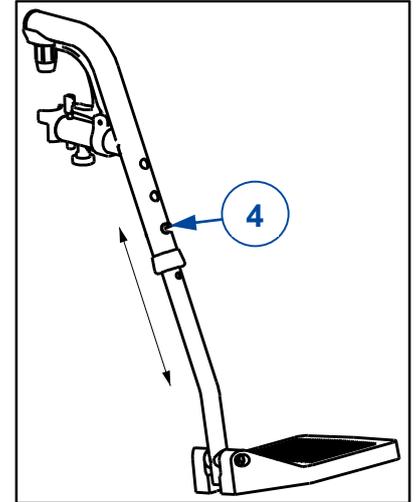

3.4 Configuración de las ruedas delanteras y traseras

El ángulo plano del asiento se puede modificar cambiando la configuración de las ruedas delanteras y traseras.

	Orificios de las ruedas traseras	Orificio de la rueda delantera	Ángulo plano del asiento
Bloque de montaje orientado hacia ABAJO	4, 5	A	2°
	4, 5	B	3,7°
	4, 5	C	5°
Bloque de montaje orientado hacia ARRIBA	3, 4	A	3°
	3, 4	B	4,7°
	4, 5	B	0,4°
	4, 5	C	2,2°
	4, 5	D	4°

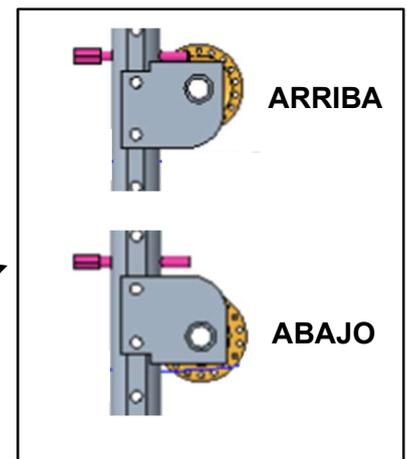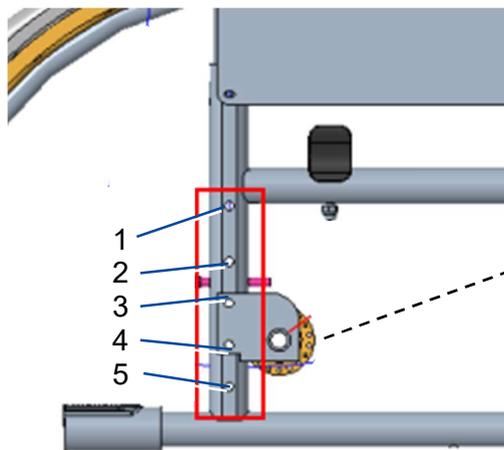

3.5 Cambio de neumáticos (si procede)

PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones y daños

- Asegurarse de que se ha deshinchado completamente el neumático antes de retirarlo.
- Asegurarse de que no queden atrapados el tubo interno, partes del cuerpo o cualquier otro objeto entre el neumático y la llanta.
- Asegurarse de que todos los tornillos estén bien fijados con la mano antes de utilizar la silla de ruedas.
- Asegurarse de que la presión es correcta; ver la indicación de presión en los neumáticos.
- Hinchar el neumático usando una herramienta de hinchado que cumpla las normativas vigentes y con un indicador de presión en «bar».
- Utilizar solo piezas de repuesto aprobadas por Vermeiren.

ES

Para cambiar el neumático o la cámara, siga estos pasos:

1. Deshinchar totalmente la cámara.
2. Insertar un desmontador de neumáticos entre el neumático y la llanta.
3. Empujar suavemente la palanca hacia abajo. Esto hará que el neumático se salga por encima de la llanta.
4. Mover la palanca a lo largo de la llanta para que el neumático vaya saliendo.
5. Retirar el neumático con cuidado de la llanta y sacar la cámara.



Colocar la guía de la llanta en posición por encima de la válvula de aire antes de insertarlo en la llanta. A continuación, la guía de la llanta se puede colocar por encima fácilmente. Comprobar que todos los extremos de los radios están cubiertos (la guía de la llanta no es necesaria en el caso que la llanta sea de plástico).



Presionar el neumático sobre la llanta, empezando por detrás de la válvula. Hinchar la cámara ligeramente hasta que empiece a redondearse y colóquela dentro del neumático.



Cuando la cámara se encuentre dentro de la rueda sin arrugarse (si presenta arrugas, deje salir un poco de aire), se puede montar la parte superior de la rueda con facilidad presionando con ambas manos empezando de nuevo por la válvula. Empujar ligeramente la válvula hacia adentro y tire de ella hacia fuera de nuevo para garantizar que el neumático quede bien colocado alrededor de la válvula.



Vermeiren GROUP NV
Vermeirenplein 1 / 15
2920 Kalmthout
BE

sitio web: www.vermeiren.com

Instrucciones destinadas a los distri-buidores especializados

El presente manual de instrucciones es parte integrante del producto y se debe adjuntar a todas las producto que se vendan.

Versión: A, 2019-11

Todos los derechos reservados, incluidos los de la traducción.

Se prohíbe la reproducción total o parcial del presente manual de cualquier forma (impresión, fotocopia, microfilm o cualquier otro procedimiento), así como la edición, copia o distribución empleando sistemas electrónicos, sin el permiso escrito del editor.